

猪衣原体抗体检测卡使用说明书

(胶体金法)

【产品名称】

通用名: 猪衣原体抗体检测卡 (胶体金法)

英文名: Test Kit for Antibodies to Swine Chlamydiosis (GICA)

【包装规格】 40T/盒、20T/盒

【预期用途】 猪衣原体病是由鹦鹉热亲衣原体的某些菌株引起的一种慢性接触性传染病, 又称流行性流产、猪衣原体性流产。

本试剂用于检测本试剂用于检测猪血清中猪衣原体抗体, 可用于猪衣原体病疫苗免疫效果评价。

【原 理】 本试剂采用胶体金免疫层析试验(GICA)原理制成, 样本加入到加样孔后与胶体金标记物一起沿层析膜移动, 若样本中存在猪衣原体抗体则使检测线显示紫红色, 若样本中不存在猪衣原体抗体则不产生颜色反应。

【试剂盒组成】

序号	名称	50T/盒	25T/盒
1.	检测卡 (含吸管)	50 个	25 个
2.	说明书	1 份	1 份

【储存及有效期】 储存于阴凉干燥处 (2-30℃), 有效期 24 个月。

【样本准备】

- 1.按常规方法抽取 2-3ml 血液置洁净干燥的试管中, 静置约 1 小时待血液凝固后于 4000 转/分钟离心 10 分钟 (也可将血液静置约 2 小时, 待血液凝固自然析出血清), 分离血清。要求血清清亮, 无溶血、无污染。血清样本短期可于 2~8℃保存, 长期需置-20℃保存。 (推荐)
- 2.也可采用加抗凝剂的全血作为检测样本。不加抗凝剂的全血必须采出后立即进行检测, 以免样本凝固而无法流动到检测窗。全血样本不能冷冻。。

【试验方法】

- 1.撕开检测卡铝箔包装袋, 取出检测卡, 放于平整、洁净的台面上。
- 2.用配套吸管吸取已准备好的样本, 缓慢、逐滴的 (应避免泡沫产生) 滴加 2 滴 (约 60ul) 到加样孔内。
- 3.室温下放置 10-20 分钟判断结果, 超过 20 分钟的结果无效。

【结果判断】

- 1.阴性: 在观察孔内, 只有对照线区 (C) 出现一条紫红色线。
- 2.阳性: 在观察孔内, 检测线区 (T) 及对照线区 (C) 同时出现紫红色线。
- 3.失效: 在观察孔内, 对照线区 (C) 不出现紫红色线。

【试验结果的解释】

1. 如果该猪未接种过猪衣原体疫苗:
 - a) 当被检样品检测线 (T) 处无明显色带出现, 说明被检测样品中没有猪衣原体抗体。如果猪群健康, 则表示没有猪衣原体感染。
 - b) 当被检样品检测线 (T) 处有明显色带出现, 则该动物存在猪衣原体感染或既往感染, 应进一步观察验证。
2. 如果该猪已接种过猪衣原体疫苗:
 - c) 当被检样品检测线 (T) 处无明显色带出现, 说明疫苗免疫未产生保护性抗体, 存在感染野毒的风险, 建议进行疫苗补种。

d) 当被检样品检测线（T）处有明显色带出现，说明疫苗免疫产生了保护性抗体。但是如果出现衣原体感染的相应症状，则不能排除由于免疫失败，而发生衣原体感染的此种情况。

【试验方法的局限性】

该试验仅用于定性检测猪衣原体抗体，根据检测线显色深浅可作抗体水平强、中、弱的粗略评估。

【注意事项】

1. 试验前请仔细阅读说明书，本产品提供的各种试剂仅供本实验用。
2. 过期或铝箔袋破损的产品，均不可使用。
3. 检测卡从冰箱中取出时应恢复到室温后打开，打开的检测卡应尽快使用以免受潮后失效。
4. 去离子水、自来水、生理盐水不能作为阴性对照。
5. 待检样本应新鲜清亮，避免使用污染浑浊、严重溶血、大量血脂、异常粘稠的样本。
6. 避免接触检测卡上加样孔和检测窗处的层析膜。
7. 试验的废弃物应视为污染物，并按当地相关规定妥善处理。